


DHD
CLINIFLO[®]

Účel použití: DHD CLINIFLO je určen k tomu, aby formou hlubokého nadechování napomáhal při pooperační prevenci a léčbě atelektáze (nedostatečná rozpínavost plic).


Kontraindikace:

1. Pacient není přes důkladné poučení schopen pomůcku správně používat.
2. Vitální kapacita je nižší než 10ml/kg tělesné hmotnosti.


INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

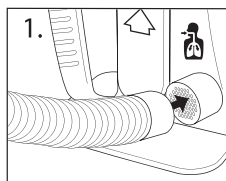


1. K pomůcce připojte hadici s náústkem a hadici natáhněte.

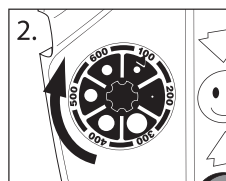


2. Otočnou stupnici na zadní straně pomůcky nastavte na požadovanou rychlost průtoku. Pacient by měl být schopen dosáhnout nádechového času alespoň 5 vteřin.

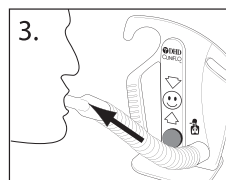

3. Do úst vložte náustek. Nadechněte se pomalu a zhluboka tak, aby se žlutý indikátor držel mezi šipkami na úrovni směřujícího se obličejem.

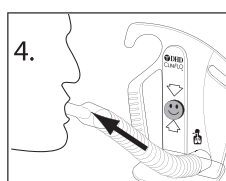

4. Nadechněte se tak hluboko, jak je to možné. Nemůžete-li se již více nadechnout, zadržte dech na 5 vteřin a poté normálně vydechněte.

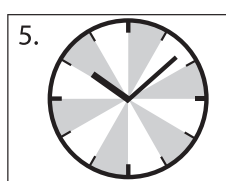

5. Opakujte postup 5 - 10x za hodinu, po každém probuzení nebo dle doporučení Vašeho lékaře.

REF 22-1200

PORTEX[™]

DHD ClinifLO[®]
Nádechový motivační spirometr

CE
0123

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: 1 800 258 5361 (US/CA)
Tel: +1 614 210 7300

Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Velká Británie
Tel: +44 (0) 1233 722100



www.smiths-medical.com

Smiths Medical a Portex jsou designové a DHD ClinifLO obchodní značky Smiths Medical. Symbol © indikuje, že obchodní značka je registrovaná u Úřadu patentů a ochranných známek v USA a v některých dalších zemích.

© 2017 Smiths Medical, všechna práva vyhrazena

40-7420-51C (1/17)

smiths medical

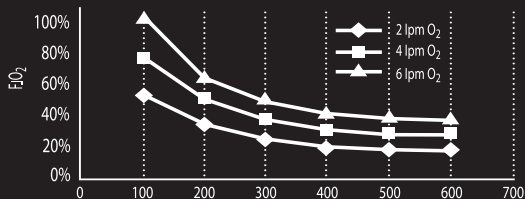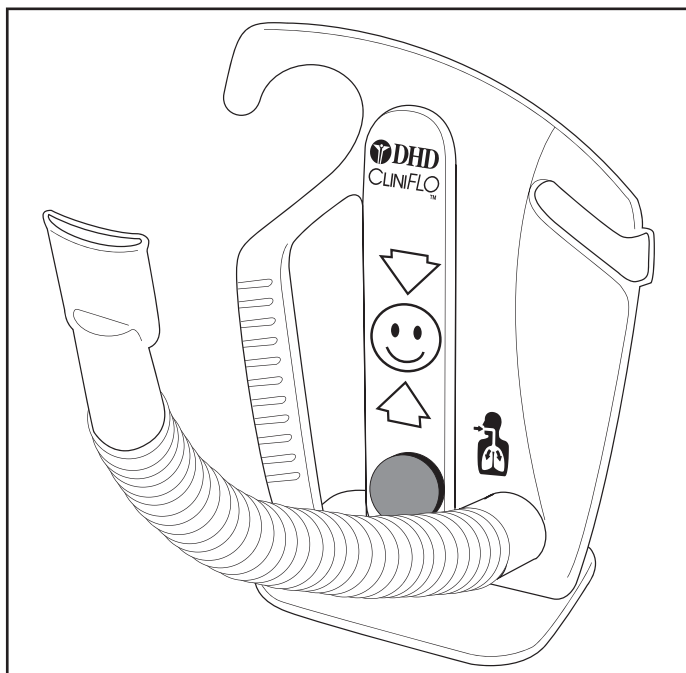

Nádechový průtok ml/sec.



Pozor, čtěte návod k použití. Není vyrobeno z přírodního gumového latexu. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.

Nesterilní. Katalogové číslo. Číslo šarže. Datum výroby. Množství. **Varování:** Federální (USA) zákony omezují prodej této pomůcky pouze na lékařský předpis. **Určeno pro použití jedním pacientem.**

	3s	4s	5s	6s	7s	8s
100 ml/s	300ml	400ml	500ml	600ml	700ml	800ml
200 ml/s	600ml	800ml	1000ml	1200ml	1400ml	1600ml
300 ml/s	900ml	1200ml	1500ml	1800ml	2100ml	2400ml
400 ml/s	1200ml	1600ml	2000ml	2400ml	2800ml	3200ml
500 ml/s	1500ml	2000ml	2500ml	3000ml	3500ml	4000ml
600 ml/s	1800ml	2400ml	3000ml	3600ml	4200ml	4800ml